

Baby Fun Patches

Anleitung



1. Babybrillen mit Nasenpads



Step 1

Schieben Sie den Brillenbügel durch den kleinen Gummizug.



Step 2

Positionieren Sie das Patch hinter dem Brillenglas.



Step 3


Drücken Sie das Nasenpad durch das Knopfloch hinter dem langen Gummizug.



Step 4

Falls erforderlich, richten Sie das Patch nochmals wenn die Brille getragen wird.

2. Babybrillen ohne Nasenpads

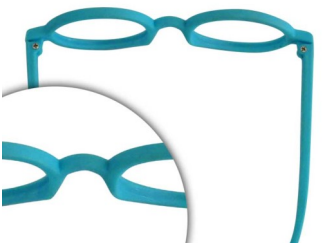

Step 1

Schieben Sie den Brillenbügel durch den langen Gummizug.



Step 2

Schieben Sie das Patch weiter entlang des Bügels bis Sie den Bügel auch durch den kürzeren Gummizug fahren können.



Step 3

Ziehen Sie das Patch weiter Richtung Nasensteg bis es das Brillenglas vollständig abdeckt.



Step 4

Positionieren Sie das Knopfloch da, wo die Brille die Nase berührt und falls erforderlich, richten Sie das Patch nochmals wenn die Brille getragen wird.