

Fun Patches

Anleitung



1. Kinderbrillen mit Nasenpads



Step 1

Schieben Sie den Brillenbügel durch die zwei Knopflöcher.



Step 2

Positionieren Sie das Patch hinter dem Brillenglas.



Step 3

Drücken Sie das Nasenpad durch das Knopfloch hinter dem langen Gummizug.



Step 4

Falls erforderlich, richten Sie das Patch nochmals wenn die Brille getragen wird.

2. Kinderbrillen ohne Nasenpads



Step 1

Schieben Sie den Brillenbügel durch den langen Gummizug.



Step 2

Schieben Sie das Patch weiter entlang des Bügels bis Sie den Bügel auch durch die zwei Knopflöcher fahren können.



Step 3

Ziehen Sie das Patch weiter Richtung Nasensteg bis es das Brillenglas vollständig abdeckt.



Step 4

Positionieren Sie das Knopfloch da, wo die Brille die Nase berührt und falls erforderlich, richten Sie das Patch nochmals wenn die Brille getragen wird.